

拡大読書器 クローバー 10 の基本操作マニュアル

本体上部ひだり側のオレンジ色のスイッチをスライドさせるとカメラの前後を切り替えます。前面カメラを使用すると顔を大きく映し出すことができ、お化粧などに便利です。

カメラモード切替スイッチ



読書モード

本体のスタンドを開きます。片手で黒いフレームの端を持ち、もう片方の手で背面の白いスタンド部分を広げます。

遠方モード

本体のスタンドを閉じます。看板など遠くのを拡大して見るすることができます。

電源ボタン

- ・本体ひだり側面の上部にあります。やさしく長押ししてください。電源が入ると緑または黄緑に点灯します。

ハイコントラストモードボタン

- ・写るものを白地に黒、黒地に白、黄色地に黒など見やすいモードに切り替えることができます。
- ※ボタンのひだり側に触って確認できる小さい四角があります。

液晶画面

液晶画面は強い衝撃を与えると割れてしまいます。落としたり、ぶついたりしないよう丁寧にお取り扱いください。

操作レバー

拡大した画像を上下・左右にスクロールすることが可能です。本体を動かすことなく、スムーズに文章を読むことができます。

フルカラーボタン

- ・ハイコントラスト表示からフルカラー表示に戻します。遠方を見るときに便利です。
- ※ボタンのみぎ側に触って確認できる小さい三角があります。

縮小ボタン

※縮小ボタンのひだり側に触って確認できる小さいへこみがあります。

拡大ボタン

※拡大ボタンのみぎ側に触って確認できる小さいふくらみがあります。

- ・拡大・縮小ボタンは読書モード使用時、無段階で2.7倍～17倍まで調節可能です。