

クローバーブック シリーズ 使用準備

写真○部のテーブルを押さえながら矢印の方向へ引き上げてください。

1.



2.



次にテーブルを押さえながらモニターを手前に引いて出してください。

3.



4.



クローバーブックのみ

5.



6.



各部の名称

取扱説明書の各部の名称の番号に合わせています。



基本的な機能と操作方法

ボタン	機能	操作
8 	電源を入れる・切る	電源ボタンを約3秒間長押しする
	バッテリーの残量確認	電源ボタンを押す
	待機モードから復帰	
5 	拡大する	拡大/縮小ボタンを時計回りに回す
	縮小する	拡大/縮小ボタンを反時計回りに回す
	位置表示	拡大/縮小ボタンを短く押す
3 	カラーモードを変更する	モードボタンを回す
	フルカラーモードに戻る	モードボタンを押す
18 	静止画/動画 切替	静止画シャッターボタンを押す
	画像の保存	静止画シャッターボタンを約3秒間長押しする
4 	拡大した画像をスクロール	見たい方向に操作レバーを倒す
	スクロール速度を変更	操作レバーを任意の方向に押し、拡大/縮小ボタンを回す
13 	ライン、マスク表示	ライン/マスクボタンを押す
	コントラスト調整	モードボタンを押しながら拡大/縮小ボタンを回す
12 	遠方・読書モード切替 (クローバーブック)	切り替えボタンを短く押す
	保存画像/ファイルを開く・読書モードへの切替 (クローバーブックライト)	切り替えボタンを長押しする
A4サイズの撮影		
2 	保存画像・ファイルを開く	メニュー/戻るボタンを長押しすると選択できます
	A4サイズの撮影	メニュー/戻るボタンを短く押し選択
	明るさ調整	
	ライトオン・オフ	

