

据置型拡大読書器 メゾ・フォーカスの基本操作マニュアル

同梱の取扱説明書に見出しを付けております。

- ①使用前の準備 のページにて本体モニターを起こしてください。(8ページ)
- ②電源の接続をします。ACアダプタと電源コードを接続し、本体側接続口と電源コンセントに接続します。(10ページ)
- ③ブレーキレバーについて のページにてXYテーブルの動く方向をご確認ください。(13ページ)
- ④電源スイッチについて のページにて本体電源のスイッチのオン/オフをご確認ください。(14ページ)

電源オンまでのセッティングができましたら、見たいものをテーブルの上に置いて、コントロールパネルを操作してください。

