

<メニュー項目の階層表示および設定内容>

メインメニュー

- カラー濃度 -----*-25 (-50 ~ +50)
 - △言語(Language) ----*日本語 (ENGLISH(英語) | DEUTSCH(ドイツ語) | FRANÇAIS(フランス語) | ITALIANO(イタリア語) | NORSK(ノルウェー語)) 他
 - オートフォーカス -----*常時 AF モード (ワンプッシュ AF モード)
 - 最小倍率 -----*標準 (低).....標準 = 最小約 3.0 倍 低 = 最小約 1.8 倍
 - 最大倍率 -----*低 (標準 | 高).....低 = 最大約 34 倍 標準 = 最大約 44 倍 高 = 最大約 110 倍
 - 周波数 -----*50Hz (60Hz)
 - モニターの明るさ -----*100% (75% | 50% | 25%)
 - 初期設定に戻す ----- 初期設定に戻すことの [確認]
 - 拡張設定 -- モード設定 --△モード 1 (*カラー) -- 色設定 1 --- モード(*カラー) -- (*カラー | 無効 | モノクロ | その他)
 - 文字色 -(黒 | 赤 | 緑 | 青 | 黄 | 深紅 | 青緑 | 白 | ユーザー 1 | ユーザー 2)
 - 背景色 -(黒 | 赤 | 緑 | 青 | 黄 | 深紅 | 青緑 | 白 | ユーザー 1 | ユーザー 2)
 - 色反転 - 文字色、背景色の反転の色

注) 文字色、背景色、色反転は、モードを[その他]に選択した時のみ、変更可能です。

 - 戻る
 - △モード 2 (*黒 / 白) -- 色設定 2 --- モード(*その他) --(設定項目については、色設定 1 を参照)
 - △モード 3 (*白 / 黒) -- 色設定 3 --- モード(*その他) --(設定項目については、色設定 1 を参照)
 - △モード 4 (*黄 / 黒) - 色設定 4 --- モード(*その他) --(設定項目については、色設定 1 を参照)
 - モード 5 (*無効) ----- 色設定 5 --- モード(*無効) ----(設定項目については、色設定 1 を参照)
 - モード 6 (*無効) ----- 色設定 6 --- モード(*無効) ----(設定項目については、色設定 1 を参照)
 - ユーザーカラー ----- ユーザー1-赤 *16 (0 ~ 31)
 - ユーザー1-緑 *16 (0 ~ 31)
 - ユーザー1-青 *16 (0 ~ 31)
 - ユーザー2-赤 *0 (0 ~ 31)
 - ユーザー2-緑 *0 (0 ~ 31)
 - ユーザー2-青 *12 (0 ~ 31)
 - 戻る
 - 戻る
 - △ラインカラー ----- 赤 *31 (0 ~ 31)
 - 緑 *0 (0 ~ 31)
 - 青 *0 (0 ~ 31)
 - 戻る
 - マスク透過度 -----*0% (25% | 50%)
 - △メッセージ表示 -----*オン (オフ)
 - △反射防止フィルター(工場設定用) -----*オフ (オン)
 - ユーザー設定の保存 ----- 変更項目の保存の [確認]
 - ユーザー設定に戻す----- 今の状態からユーザー設定に変更するのかの [確認]
 - △メンテナンスモード(操作不可)
 - 戻る
- 終了

△については、初期設定を変更しないことをお勧めします。

*: 初期設定

(): 変更および調整範囲