


# メゾ HD 取扱説明書

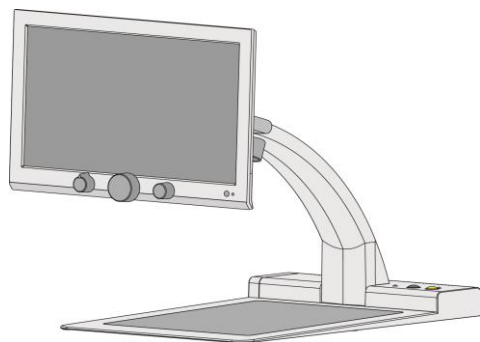

この度は「メゾ HD」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～10ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と共に大切に保管してください。

# もくじ

1.	はじめに	3
2.	安全上のご注意	4
3.	ご注意ください	11
4.	内容物	13
5.	本体の組み立て方法	14
6.	各部のなまえ	17
7.	各部の詳細説明	19
8.	バッテリー(オプション)について	26
9.	その他	27
10.	廃棄の際のご注意	27
11.	仕様	28
12.	保証とアフターサービス	29
13.	お客様相談室	32

# 1. はじめに

この度は、メゾ HD をご購入頂き、ありがとうございます。この商品は REINECKER 社 (ドイツ) の拡大読書器です。

文章や写真を、15.6 インチの画面に約 2.2 倍～約 90 倍に拡大して表示することができます。

据置型でも小型軽量で、いろいろな場所で、シンプルかつ快適に使えることを重視して設計されています。ご不明な点がありましたら、取扱説明書の最後のページに記載しております、弊社お客様相談室か、ご購入いただいた販売店までお問い合わせください。

## 2. 安全上のご注意

安全にお使いいただくために…

必ずお守り下さい

この「取扱説明書」の表示では、本装置を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。次の表示と図記号の意味をよくご理解いただいてから本文をお読み下さい。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 図記号の意味



名称：注意

意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：禁止

意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な禁止内容は近くに文章や絵で示します。



名称：風呂場・シャワー室での使用禁止

意味：装置を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。



名称：接触禁止

意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。



名称：分解禁止

意味：装置を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。



名称：強制

意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な内容は近くに文章や絵で示します。



名称：電源プラグをコンセントから抜け

意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が書かれています。



## 警告



万一、装置から煙がでていたり、異臭や異音がするなど、異常状態の場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認したのち、ただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置の内部に水、金属類などの異物が入ってしまった場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せずただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置を落としたり、カバーなどを破損した場合には、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せず、ただちに販売店に連絡して下さい。



## 警告



装置から液体が漏れ出している場合は、装置に触れない。失明や火傷などの事故の原因となります。特に、液体が目に入ってしまった場合は多量の水道水でただちに患部を洗浄し、至急医師の診断を受けて下さい。

また、液体に触れた場合や液体が染みた衣服などに触れた場合でも水道水でただちに洗浄し、医師の診断を受けて下さい。なお、これに併せてただちに販売店に連絡して下さい。



引火性のガスや発火性の物質がある場所では使用しない。火災、爆発の原因となります。



装置のカバー、キャビネットを外さない。感電の原因となります。

内部の点検、整備や修理は販売店にご依頼下さい。



装置を分解、改造しない。火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧で使用する。火災や感電の原因となります。



## 警告



風呂場、雨や雪が降っている屋外、その他水がかかるところ、湿気の多いところでは使用しない。感電の原因となります。



露の付いた状態で使用しない。感電の原因となります。



ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルを装置の下敷きにしない。ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となります。



ケーブルが痛んだら（芯線の露出、断線など）、すぐに使用を止め、販売店に交換を依頼する。火災や感電の原因になります。



ケーブルを無理に引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたりしない。火災や感電の原因になります。



雷が鳴り出したら、装置や接続されたケーブルなどに触れない。感電の原因となります。





## 注意



必ず付属のACアダプタを使用する。他のACアダプタを使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う。感電の原因となる場合があります。



装置を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。火災の原因となる場合があります。



ケーブルを着脱するときは、プラグ部分を持って行う。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となる場合があります。



ほこりの多い場所で使用しない。火災や感電の原因となる場合があります。  
電源プラグや接続部にほこりが付着している場合は取り除いて使用して下さい。



## 注意



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプタ、電源プラグやケーブルを抜き差ししない。感電の原因となる場合があります。

### 付属のXYテーブルについての注意事項！

XY テーブルは本体の上に載せて使用しますが、固定されていません。XY テーブルを載せた状態での移動や、テーブルを過度に手前に引っ張ると、落下する危険性がありますのでご注意ください。

### 3. ご注意ください


- 本機を落としたり、ぶついたりしない。また、本機に強い圧力をかけない
- 磁気や電磁波が発生するところ(電子レンジやテレビなど)からは、できるだけ離れて使う。磁気や電磁波の影響で画像が乱れることがあります
- 異常に温度や湿度が高くなる場所(真夏の車内やトランクなど)に放置しない。製品の破損や故障の原因になります
- 必ず付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード類は無理に引っ張ったり曲げたりしますと、断線の原因になります。コードを外す際はプラグ部分をもって、引き抜いてください
- 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使う際は、本機にかからないようにしてください。外装ケースの変質や塗装剥がれの原因になります
- ゴム製品やビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。外装に影響を与える可能性があります
- 液晶モニタを強く押さえないでください。画面にむらが出るなど、故障の原因になります。寒冷地などで本

機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニタが通常より少し暗くなる場合があります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります


- レンズ面を強く押さえないでください。レンズ破損の原因になります
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置く際にはご注意ください
- レンズ表面に汚れがついた場合は、レンズの表面を柔らかい布で軽くふき取ってください
- AC アダプタを使用中、AC アダプタ内部で発振音がある場合がありますが、異常ではありません
- AC アダプタを使用中は AC アダプタが熱を持ちますが、異常ではありません。ただし、長時間 AC アダプタに皮膚が触れないようにしてください
- 長時間使用しないときは、本機を涼しく湿気のない、なるべく温度が一定のところに保管してください。奨励温度は 10℃～50℃、奨励湿度は 30%～80%です
- 押入れや戸棚に本機を保管する場合、乾燥剤(シリカゲル)と一緒にいれることをお勧めします

## 4. 内容物

以下の物が全て入っているかご確認ください。もし不足がある場合は、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。

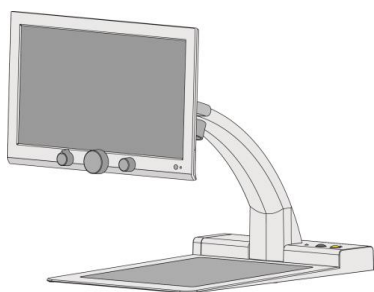

本体

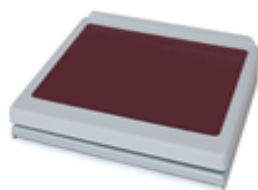

XY テーブル



取扱説明書




AC アダプタ




保証書/  
ユーザー登録用紙

## 5. 本体の組み立て方法


①本体を箱から出し、下図のように置きます

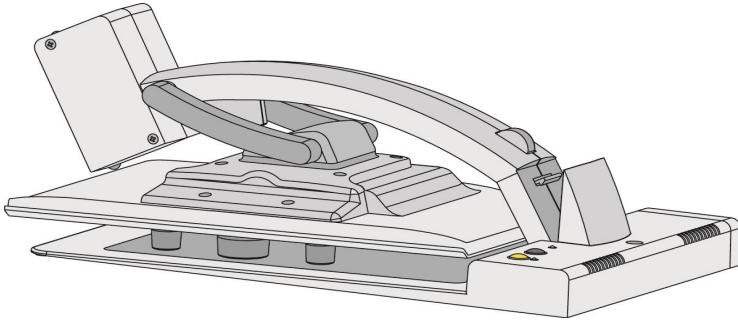

②下図のようにテーブル部を手で押さえ、アーム部が固定されるまで引き上げます

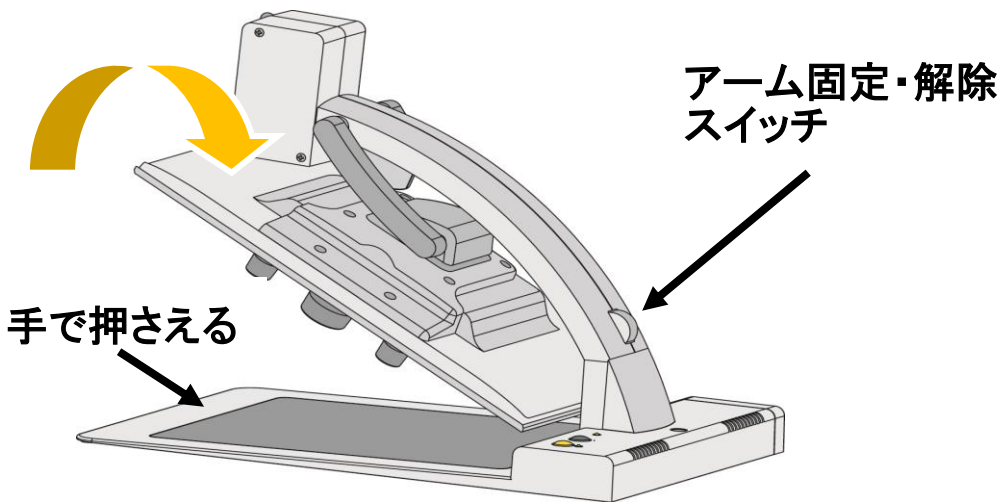


### ③モニタを下図のように引き出します

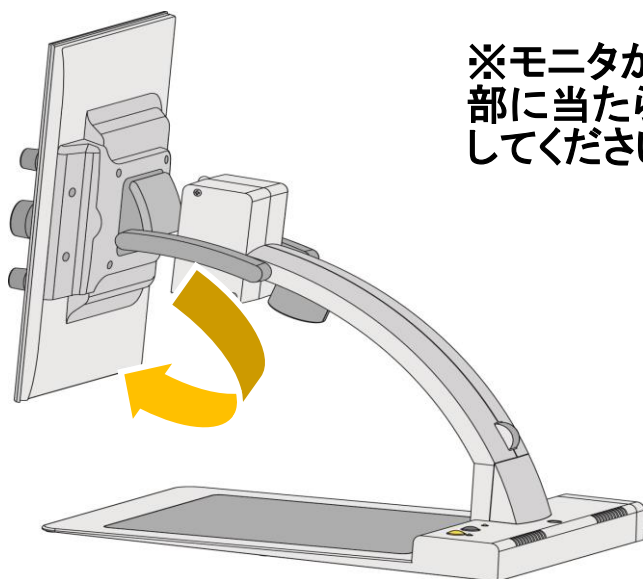

※モニタが、下のテーブル部に当たらないように注意してください

### ④モニタを下図のように右に90度回転させます

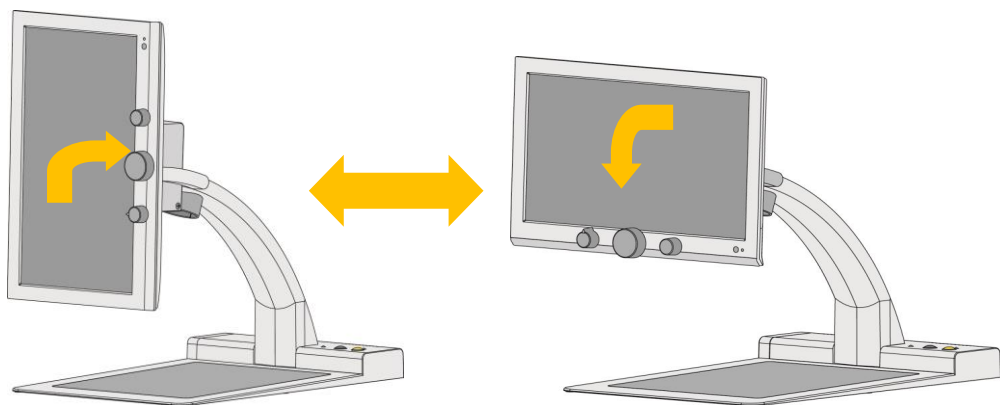

⑤ 付属の XY テーブルを下図のようにテーブル部の上に載せます




※ヘリがある方を奥になるようにテーブル部に載せてください。

※XY テーブルの落下には注意してください

⑥ 最後に付属の AC アダプタのプラグを、本体アームの後の「AC アダプタ接続口」に、コンセントプラグを電源コンセントにつなぎます


AC アダプタ

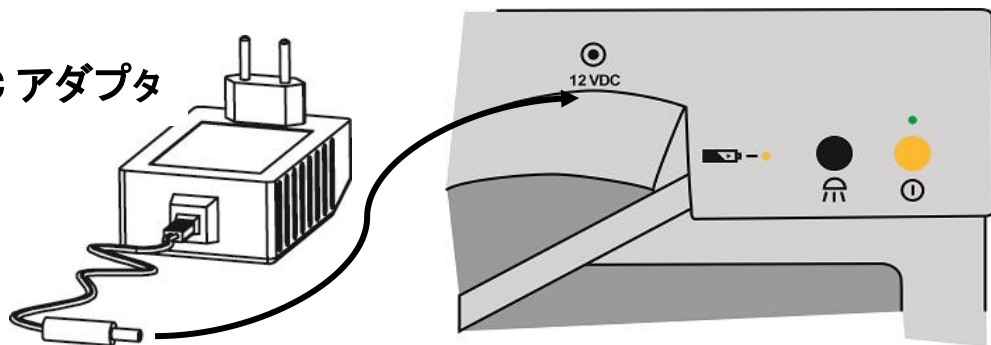




## 6. 各部のなまえ

### 本体 折りたたみ時

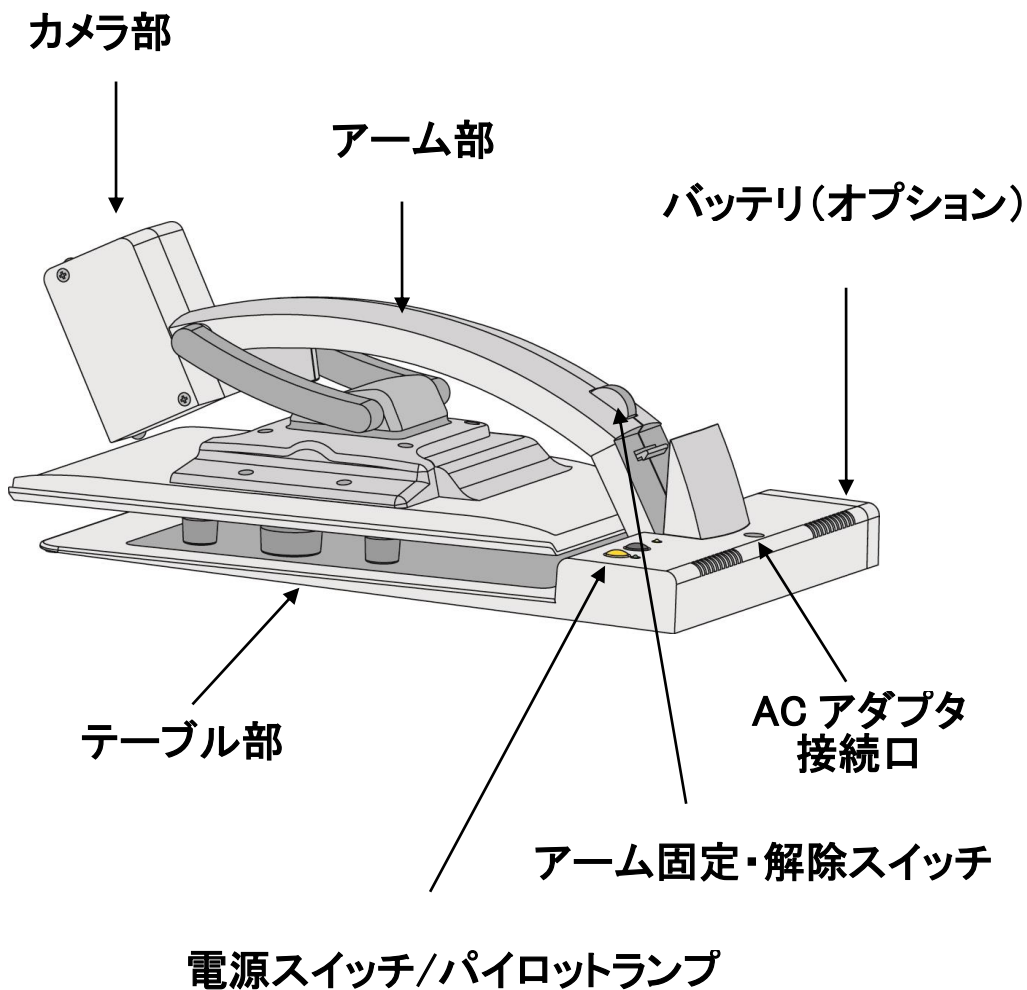


# 本体 組み立て完成のカタチ

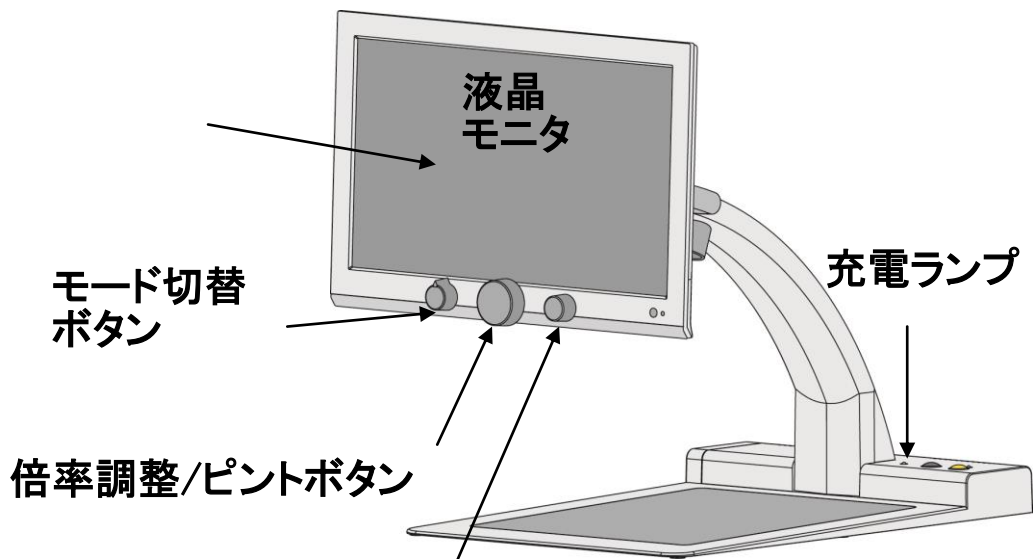

コントラスト・明るさ調整ボタン


※必要に応じて、XYテーブルを右の  
ようにテーブル部に載せて使用し  
ます

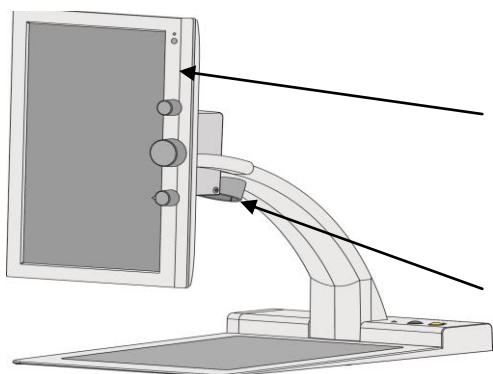

画面が左に90度回転します

LED 照明

## 7. 各部の詳細説明

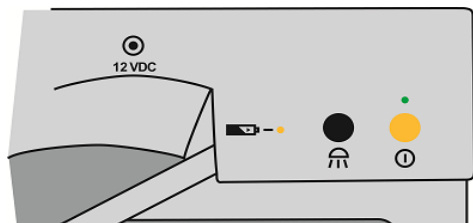

※もしパイロットランプが点灯せず、電源が入らない場合、ACアダプタのプラグとジャックが本体の差込口や、コンセントにしっかりささっているかどうか確認してください。


### 電源ボタン

- 本体右奥の電源ボタンを約 1 秒間押すとパイロットランプが点灯し、本機の電源が入ります。

### 照明ボタン

- HDには高輝度 LED 証明が搭載されています。電源ボタンのとなりの「照明ボタン」を押すと、本機のLED照明が点灯します。ボタンを押すたび

に点灯→暗く点灯→消灯を繰り返します。

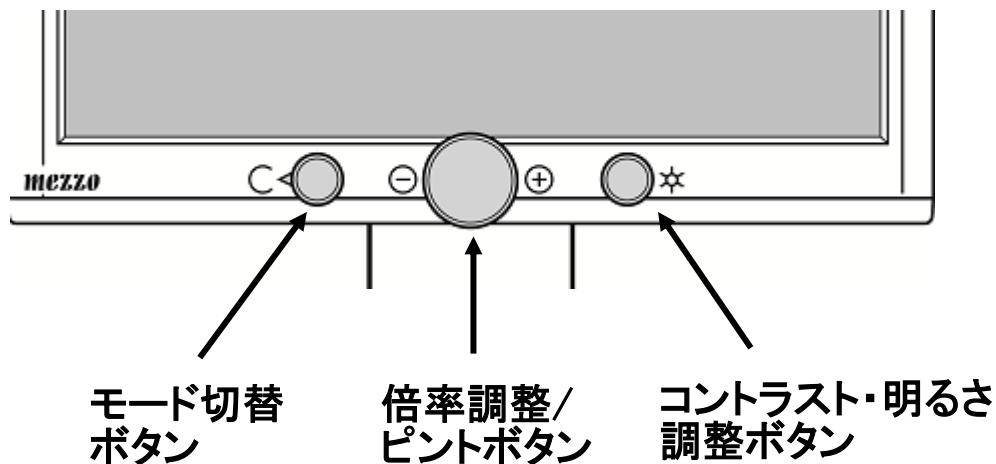

## 色の選択




画面の左下にある「モード切替ボタン」で表示色の選択ができます。左から右へ

まわすと以下の6通りに切替ができます。

- ①フルカラー ②白黒反転 ③白黒 ④黒緑
- ⑤黒黄 ⑥青黄

## 倍率調整

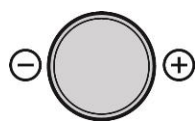


倍率調整ボタンを左右に回すことで倍率調整ができます。本機の電子ズームは 2.2 倍～90 倍の無段階調整です。(倍率は、カメラと対象物までの距離で変わります)

調節するたびに、画面下に倍率が表示されます。本機の電源を切り、再度電源を投入すると、電源を切る前の倍率が保存されるため、最後に調整した倍率で表示されます。

メゾ HD のカメラは倍率を変更しても、自動的に最も適切な焦点に合わせます。最大倍率の時、7cm の厚さの書物でも鮮明な映像に自動調整することができます。

メゾ HD のカメラは倍率を変更しても、自動的に最も適切な焦点に合わせます。最大倍率の時、7cm の厚さの書物でも鮮明な映像に自動調整することができます。

## オートフォーカス

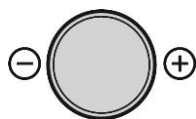


倍率調整ボタンを押すと、オートフォーカスの ON/OFF の切替が可能です。

ボタンを押すごとに、「Autofocus ON」および「Autofocus OFF」の文字が画面に約 3 秒間表示されます。

「Autofocus OFF」は、ピントが固定されるため、紙に文字を筆記するときにペンや手にピントが合わないのが有効です。

## 位置表示モード

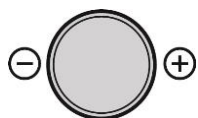

倍率調整ボタンを約2秒以上押しつづけると、自動的に最小倍率になり、


カメラの中心の位置がわかる位置表示モード

になります。赤い十字マークが画面に現れ、カメラの中心位置が表示されます。※画面左端に「Overview Mode」の文字が表示されます。手を離すと解除されます。

## 自動彩度調整機能

メゾ HD は、明るさと彩度が自動的に調整され、より自然な色で画面に表示されます。

## コントラスト・明るさ調整

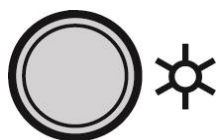


コントラスト・明るさ調整ボタンには、2つの機能があります。

ボタンが押された状態ではコントラストとカラーの明るさを調整します。ボタンが押された状態で、半

時計まわりに回すとコントラストレベルが低下します。時計回りに回すとコントラストレベルが高くなります。

## ライン・マスクング機能

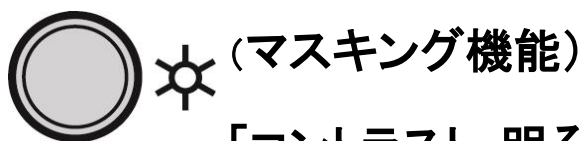


「コントラスト・明るさ調整ボタン」を引っ

張り、反時計回りに回すと、黒い帯が横方向に現れ、必要な部分以外を隠すことができます。目の状態に合わせて眩しさを軽減し、読み易くします。左右にボタンを回すとマスクングの幅の調節が可能です。書物や画像に文字を記入するときにも便利です。



## (ライン機能)

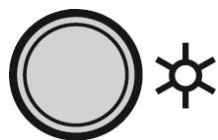

「コントラスト・明るさ調整ボタン」を引っ張り、時計回りに回すと、マスキングが消え、横ラインが1本現れます。左右にボタンを回すと上下に位置を調節することが可能です。マスキング同様、文字を読み書きするときに有効です。

## 8. バッテリー (オプション) について

メゾ HD の本体に装着し、どの場所でも本機を使用できるように外付けのリチウムイオンバッテリーのオプションがあります。

●前記の専用バッテリー以外は使用しないでください。事後や故障の原因になります。もし他のバッテリーを使用して本機が故障しても、保証対象外になります。

●バッテリーの装着方法や使用方法は、バッテリーに付属する取扱い説明書をごらんください。

## 9. その他



**注意！：必ず専用の  
ACアダプタを使用してくださ  
い。専用以外のACアダプタ**

**の使用は、機器の故障や火災の原因になります。  
(専用以外のACアダプタを使用して故障した場合、  
保証対象外になります)**

## 10. 廃棄の際のご注意

**本体およびバッテリーを廃棄する際は、お住まいの  
自治体の規則にしたがって、正しく廃棄してくださ  
い。**

## 11. 仕様

倍率	約 2.2 倍～約 90 倍
カラーモード	カラー・白黒反転・白黒・ 黒緑・黒黄・青黄
液晶	15.6インチTFTモニタ
外形寸法	横 39 × 奥行 49 × 高 49 cm
電源	ACアダプタ(12V/2A)、 リチウムイオンバッテリー
バッテリー	約 3.5 時間充電 約 2.4 時間連続使用
重量	本体約5. 3kg XY テーブル約2kg
電力	30W

※仕様は、予告なく変更されることがあります。

## 12. 保証とアフターサービス

1. 修理、お取扱い、お手入れなどのご相談アフターサービスについては、お買い上げの販売店または株式会社タイムズコーポレーションのお客様相談室にお申し付けください。
2. 保証内容は、別添付の保証書に準拠します。保証書にお買い上げ日、販売店名が記入されていることをお確かめください。
3. 保証対象は本体のみで、バッテリーなどの消耗品や、AC アダプタなどの付属品は保証対象ではありません。
4. 人工照明の下で本機を使用する場合、画面に縞模様が表示される場合があります。これは照明と本機内蔵カメラの周波数が同期するため

に起こる現象で、故障ではありません。

5. 保証期間中の液晶モニタの不良画素について、10個以下の不良画素は保証対象ではありません。
6. 修理を依頼される際は、「使用上のご注意」をはじめ、取扱説明書の内容を再度ご確認ください。なお異常のある場合は、必ず本体への電源供給を停止し、本体の電源を切ってから、お買い上げの販売店にまたは株式会社タイムズコーポレーションのお客様相談室にご連絡ください。
7. 不具合や修理のご連絡をいただく際は、ご住所、お名前、製品名、ご購入日、不具合内容、不具合が発生した際の状況などを、できるだけ詳し

くお伝えください。

8. 修理をご依頼いただく際は、本体の電源を切り、製品に保証書を添えてご持参もしくは送付してください。
9. 修理料金は、技術料、部品代、送料、出張料などで構成されています。技術料は故障箇所の診断、修理および部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。送料は、修理品を返送する際などにかかる費用です。出張料は、製品のある場所にスタッフを派遣する場合の費用です。

## 13. お客様相談室

フリーダイヤル： 0120-886610

対応時間：平日 9:00～17:30

製造元：REINECKER(ドイツ)

輸入販売元：

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051

兵庫県宝塚市高司1-6-11

TEL:0797-74-2206

FAX:0797-73-8894

URL：<http://www.times.ne.jp>

Email：[info@times.ne.jp](mailto:info@times.ne.jp)