


VISUM

Ecare 3.5"

取扱説明書

ビズム イーケア 3.5

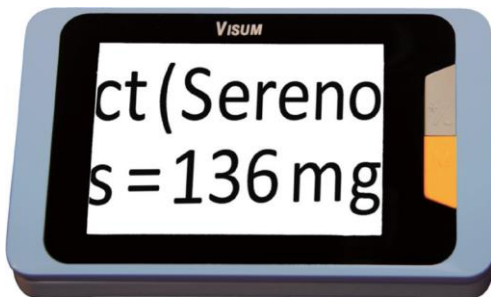

もくじ

1. ご使用になる前に	1
2. 安全上のご注意	2
3. 使用上のご注意	7
4. 付属品.....	10
5. 各部の説明	11
6. 電源 ON / OFF.....	12
7. 倍率調整	12
8. モード切替.....	13
9. 静止画.....	14
10. 明るさ調整	14
11. テレビとの接続.....	15
12. LED 照明 ON/OFF	16
13. ビープ音 ON/OFF	17
14. 設定の保存機能	17
15. 充電方法	18
16. 筆記について	19
17. 仕様	20
18. 保証・アフターサービス.....	21
19. お客様相談室.....	24

1. ご使用になる前に

Dacone 社製の携帯型拡大読書器
イーケア 3.5”をお買い上げいただき
ましてありがとうございます。イー
ケア 3.5”は、地図やレストランのメ
ニューなどを読むのに最適です。
ご使用の上で何かご質問やご提案
がございましたら、近くの販売代理
店までご連絡ください。

2. 安全上のご注意

安全にお使いいただくために…

必ずお守り下さい

この「取扱説明書」の表示では、本装置を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。次の表示と図記号の意味をよくご理解いただいたから本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

	名称：注意 意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：禁止 意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な禁止内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：風呂場・シャワー室での使用禁止 意味：装置を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：接触禁止 意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：分解禁止 意味：装置を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：強制 意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：電源プラグをコンセントから抜け 意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が書かれています。



警告



万一、装置から煙がでていたり、異臭や異音がするなど、異常状態の場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認したのち、ただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置の内部に水、金属類などの異物が入ってしまった場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せずただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置を落としたり、カバーなどを破損した場合には、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せず、ただちに販売店に連絡して下さい。



警告



装置から液体が漏れ出している場合は、装置に触れない。失明や火傷などの事故の原因となります。特に、液体が目に入ってしまった場合は多量の水道水でただちに患部を洗浄し、至急医師の診断を受けて下さい。

また、液体に触れた場合や液体が染みた衣服などに触れた場合でも水道水でただちに洗浄し、医師の診断を受けて下さい。なお、これに併せてただちに販売店に連絡して下さい。



引火性のガスや発火性の物質がある場所では使用しない。火災、爆発の原因となります。



装置のカバー、キャビネットを外さない。感電の原因となります。

内部の点検、整備や修理は販売店にご依頼下さい。



装置を分解、改造しない。火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧で使用する。火災や感電の原因となります。



警告



風呂場、雨や雪が降っている屋外、その他水がかかるところ、湿気の多いところでは使用しない。感電の原因となります。



露の付いた状態で使用しない。感電の原因となります。



ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルを装置の下敷きにしない。ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となります。



ケーブルが痛んだら（芯線の露出、断線など）、すぐに使用を止め、販売店に交換を依頼する。火災や感電の原因になります。



ケーブルを無理に引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたりしない。火災や感電の原因になります。



雷が鳴り出したら、装置や接続されたケーブルなどに触れない。感電の原因となります。



注意



必ず付属のACアダプタを使用する。他のACアダプタを使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う。感電の原因となる場合があります。



装置を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。火災の原因となることがあります。



ケーブルを着脱するときは、プラグ部分を持って行う。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



ほこりの多い場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。
電源プラグや接続部にほこりが付着している場合は取り除いて使用して下さい。



注意



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプタ、電源プラグやケーブルを抜き差ししない。感電の原因となる場合があります。

3. 使用上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください:

●充電には専用のACアダプタをご使用ください。他のACアダプタを使って充電しますと、本体に回復できないダメージをあたえ、また保証が無効となる場合があります。

●1カ月間以上お使いにならない場合は、一旦バッテリーをフル充電して、電源を切った状態にして保管してください。

●湿度の高い場所、浴室、ホコリの多い場所などでのご使用は避けてください。(使用に適した温度は5℃～40℃です。)

●分解しないでください。分解された場合には、保証対象外となります。

●廃棄する場合は、ご使用の地域(都道府県又は市町村)にて定められている



リサイクル法及び事業所にて定められている産業廃棄物処理法に従った処理を行ってください。

4. 付属品

- ① イーケア 3.5 携帯型拡大読書器
- ② AC アダプター
- ③ 専用ストラップ
- ④ 取扱説明書・保証書
- ⑤ 専用ケース
- ⑥ レンズクロス
- ⑦ ビデオケーブル

もし何か欠品がございましたら、販売店までお問い合わせください。

5. 各部の説明

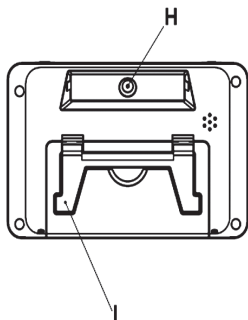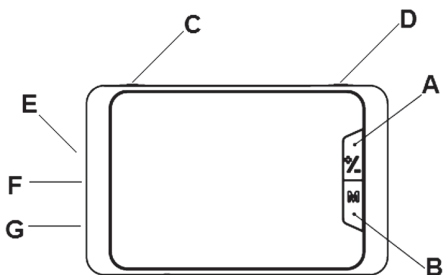

- A:ズームボタン
- B:モード切替ボタン
- C:電源ボタン
- D:シャッターボタン
- E:充電ランプ
- F:USB電源ジャック
- G:ビデオ出力端子
- H:CCD カメラ
- I:筆記スタンド


6. 電源ON / OFF

電源ボタンを約2秒間長押ししてください。電源を切る場合はもう一度2秒間長押ししてください。約3分間、本機を動かさない場合、省電力設定が働き、電源が切れます。



7. 倍率調整

ズームボタンを押すことで、拡大倍率が4段階調節できます。筆記スタンドを使用

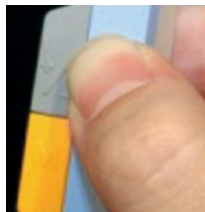

した場合、ボタンを押すごとに、3.6倍、7倍、11倍、14倍に調整できます。

本機を対象物から持ち上げて、ピン트가合う倍率は約 2.5 倍～約 17 倍です。

8. モード切替

オレンジ色の「M」ボタン(モード切替ボタン)を押すことで、8種類の中から、お好



みのカラーモードを選ぶことができます。

選択モード: カラー・グレー・白黒・

白黒反転・青白・黄黒・黄青・青黄

9. 静止画

本体右上のシャッターボタンを押すと、画像が固定されます。もう一度ボタンを押すと固定が解除されます。



10. 明るさ調整

シャッターボタンを約 3 秒間長押しすると、ビープ音が聞こえます。その時にシャッターボタン



から一度指を離し、再びボタンを押すと、押すたびに明るさが 4 段階変わります。お好みの明るさで、もう一度シャッターボタンを約 3 秒間長押しするとビープ音が鳴り、明るさが保存されます。

※調節中、他のボタンは機能しません

11. テレビとの接続

本機は、付属のビデオケーブルを使用して、テレビ画面に映像を表示することができます。


ただしアナログのビデオ入力端子 (RCA 映像入力端子) があるテレビに限ります。

●接続方法

左側面の「TV-OUT」と書いてあるビデオ出力端子に付属のビデオケーブルの黒いプラグをつなぎ、テレビのビデオ入力端子に黄色いプラグをつなぎます。

12. LED照明ON/OFF

ズームボタンを約3秒間長押しすると、LEDが消灯します。もう一度長押しすると、点灯します。

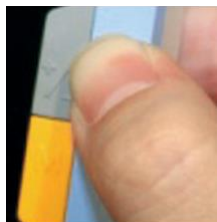

※照明をOFFにすると、画面が暗くなり映像が殆ど映りません。

13. ビープ音ON/OFF

モード切替ボタンを約3秒長押しすると本機の操作ボタンを押すたびに鳴る、



ビープ音が設定できます。

もう一度約3秒間長押しするとビープ音が消えます。

※明るさの調整、LED 照明 ON/OFF時のビープ音は消えません。

14. 設定の保存機能

本機の電源を切っても、最後に調節した倍率、カラーモード、明るさ、

ビープ音の設定を保存することができます。

次に電源を入れたときに、お好みの設定で使用することができます。

15. 充電方法

バッテリーを充電する際は、付属のACアダプタの USB プラグを本体の USB 電源ジャックに差し込んでください。反対側のプラグをご家庭のコンセントに繋ぐと、充電ができます。

充電ランプ

本体左側面にある、充電ランプは以下のように機能します。

- 赤く点滅: 充電が必要です。

- 赤く点灯:充電中
- 緑:充電完了

16. 筆記について

本機を使用して、
文字を筆記すること
ができます。

まず背面のスタン
ドを起こします。

下の画像のように本体をたて向き
にして、横からペンを入れて筆記し
てください。



17. 仕様

倍率	2.5 倍～17 倍
カラーモード	8 モード
連続使用時間	4～6時間
充電時間	約 3 時間半
画面	3.5" TFT LCD
大きさ	117×73×17 mm
重さ	約 140g
保証期間	2年間(要ユーザ 一登録)

18. 保証・アフターサービス

1. 修理、お取扱い、お手入れなどのご相談アフターサービスについては、お買い上げの販売店または株式会社タイムズコーポレーションのお客様相談室にお申し付けください。
2. 保証内容は、別添付の保証書に準拠します。保証書にお買い上げ日、販売店名が記入されていることをお確かめください。
3. 保証対象は本体のみで、バッテリーなどの消耗品や、AC アダプタなどの付属品は保証対象ではありません。
4. 人工照明の下で本機を使用する場合、画面に縞模様が表示される場合があります。これは照明と本機内蔵力

メラの周波数が同期するために起こる現象で、故障ではありません。

5. 保証期間中の液晶モニタの不良画素について、10 個以下の不良画素は保証対象ではありません。
6. 修理を依頼される際は、「使用上のご注意」をはじめ、取扱説明書の内容を再度ご確認ください、なお異常のある場合は、必ず本体への電源供給を停止し、本体の電源を切ってから、お買い上げの販売店にまたは株式会社タイムズコーポレーションのお客様相談室にご連絡ください。
7. 不具合や修理のご連絡をいただく際は、ご住所、お名前、製品名、ご購入日、不具合内容、不具合が発生した

際の状態などを、できるだけ詳しくお伝えください。

8. 修理をご依頼いただく際は、本体の電源を切り、製品に保証書を添えてご持参もしくは送付してください。
9. 修理料金は、技術料、部品代、送料、出張料などで構成されています。技術料は故障箇所の診断、修理および部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。送料は、修理品を返送する際などにかかる費用です。出張料は、製品のある場所にスタッフを派遣する場合の費用です。

19. お客様相談室

フリーダイヤル: 0120-886610

対応時間: 平日 9:00~17:30

製造元: Beijing Outsmarting Dacone

輸入販売元:

株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051

兵庫県宝塚市高司1-6-11

TEL: 0797-74-2206

FAX: 0797-73-8894

URL: <http://www.times.ne.jp>

Email: info@times.ne.jp